

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8 83365 Nussdorf-Traunstein

phone +49 (0) 86 69 / 86 42-0 fax +49 (0) 86 69 / 86 42-49


email@h-p-cosmos.com www.h-p-cosmos.com



Ort, Datum, Unterschrift und Stempel

Hinweise zur Fehlersuche

- □ Wenn Sie einen technischen Defekt vermuten, dürfen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht mehr in Betrieb nehmen.
- □ Sollten Sie eine Störung selbst beheben, melden Sie die Störung trotzdem an h/p/cosmos, damit der Fehler in der Stammakte des Gerätes registriert werden kann.
- Vor jedem Eingriff in das Gerät muss aus Sicherheitsgründen der Netzstecker gezogen werden.
- 1. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung für das Gerät in Ordnung ist, indem Sie versuchsweise ein anderes elektrisches Gerät an der Steckdose für das Gerät testen.
- 2. Verwenden Sie keine Verteilersteckdosen und keine Verlängerungen, sondern stecken Sie das Gerät direkt an eine separate Wandsteckdose! Andernfalls sind Fehlfunktionen unvermeidbar!
- 3. Überprüfen Sie, ob Not-Aus-Schalter (evtl. auch "extern") gezogen, und der Hauptschalter (Sicherung) angeschaltet sind.
- Sind eventuell Sicherheitslichtschranken wegen Schmutz oder Fremdkörper aktiviert?
 □ ja □ nein
- 5. Ist ein Reha-Stop-Schalter aktiviert? ☐ ja ☐ nein
- 6. Falls Sie "mechanische Klopfgeräusche" während des Betriebes hören, prüfen Sie ob das Gerät einen festen Stand hat (Einstellfüße beachten) und befolgen Sie die Anleitung im Handbuch: "Aufstellen des Gerätes"
- 7. Wann und wie oft ist der Fehler bisher aufgetreten?
- 8. Welche anderen elektrischen Geräte waren parallel noch in Betrieb?
 - ·_____
- 9. Notieren Sie die genauen Anzeigen aller Displays nach dem aufgetretenem Fehler

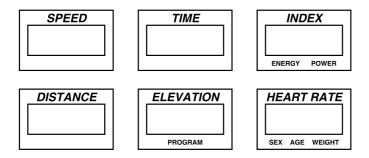

10. Konnten Sie nach dem aufgetretenen Fehler das Gerät sofort mit der Taste "START" wieder starten, oder mussten Sie es zuvor mit dem Taster "OFF" ganz ausschalten?

